

Благодарим за покупку ростомера!

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе с ростомером, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации (РЭ) ростомера детского медицинского РДМ-01 предназначено для широкого круга потребителей и содержит необходимые сведения о назначении, принципе действия, технические характеристики и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, хранения и транспортирования ростомера.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РДМ-01 предназначен для измерения роста у новорожденных и детей до полутора лет в медицинских учреждениях, родильных домах, детских больницах, поликлиниках, центрах педиатрического профиля, домах ребенка, ясельных учреждениях и др.

Обозначения при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен: «Ростомер детский медицинский РДМ-01 ТУ 9441-043-00226454-2011».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел измерения (НПИ), мм	845
Наименьший предел измерения (НмПИ), мм	150
Дискретность отсчета, мм	1
Пределы допускаемой погрешности измерения, мм	±2
Габаритные размеры, не более, мм	950 x 330 x 90
Масса, не более, кг	1,5

Наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3%-ным раствором пер-

рекси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-ного моющего вещества по ГОСТ 25644.

Ростомеры при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150:

- в рабочем диапазоне температур от +10 до +40 °С;
- относительной влажности 80 % при 25 °С.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки ростомеров должна быть:

1. Ростомер 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 экз.
3. Упаковка 1 шт.



Рис. 1. Внешний вид ростомера

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Положите ребенка головой в нишу ростомера до упора с подголовником (1)

Отведите ползун ростомера, рукой выпрямите ножки ребенка (2)

Подведите ползун ростомера до упора с ножками ребенка (3)

Считайте показания ростомера согласно указателю шкалы (4)

